



MEDICAL DISPOSABLE PROTECTIVE SUIT PC001

MEDIZINISCHER EINWEG-SCHUTZANZUG PC001
GEBRAUCHSANLEITUNG (1)


Modellbezeichnung: MEDIZINISCHER EINWEG-SCHUTZANZUG PC001 (Schutzanzug)

Dieser Schutzanzug entspricht den Anforderungen der Verordnung für PSA (EU) 2016/425 [OJ L 81, 31/03/2016, p.51-98] und kann gemäß der EN 340:2003 [2005/C 306/01] und EN ISO 13688:2013 [OJ5 C113-27/03/218] (Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen) und EN 13034:2005 + A1:2009 [OJ C 113-27/03/2018] (Chemische Schutzkleidung, Typ 6) verwendet werden.

Er erfüllt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 [OJ L 117, 05/05/2017, p176-332] sowie der EN 14126:2003 [OJ C 113 27/03/2018] und bietet Schutz gegen Infektionserreger (Typ 6B).

Die EU-Baumusterprüfung wurde durch die notifizierte Stelle ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX) Plaza Emilio Sala Nr. 1, Alcoy, Spanien, Notifizierungsnummer 0161 mit dem EU-Baumusterprüfbericht Nr. 20/2708/00/0161 durchgeführt.

Dieser Schutzanzug besteht aus weißem Stoff, Polypropylen-Doppelschichtvlies mit einer Polyurethanbeschichtung von 65 gr/m² ± 5 gr/m².

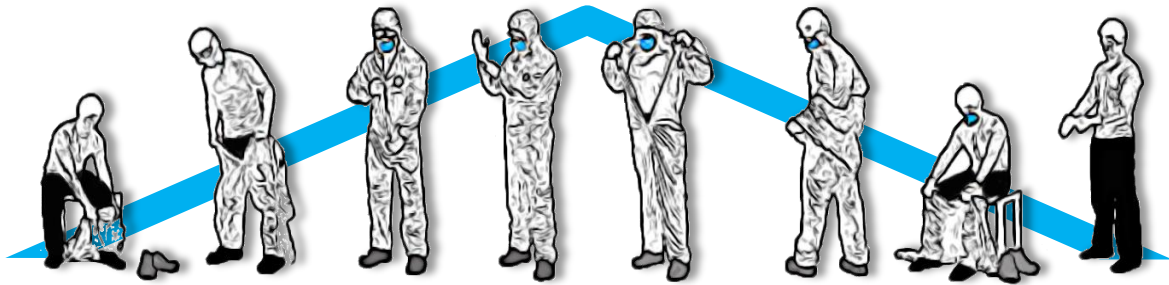

Korrektes An- und Ausziehen des Schutzanzuges

Verwendungsempfehlungen und Risiken beim Tragen des Schutzanzuges

Einsatz bei Aktivitäten, bei denen der Benutzer bestimmten Risiken ausgesetzt ist:

- Der Schutzanzug bietet gemäß EN ISO 13034:2009 einen eingeschränkten Schutz vor Exposition von Sprühnebel und gelegentlichen Spritzern von flüssigen Chemikalien mit geringem Volumen (Typ 6) an den Teilen des Körpers, die bedeckt sind. Er schützt weiterhin gegen Infektionserreger (Typ 6B).
- Zur Erreichung der Schutzleistung muss das Kleidungsstück korrekt angezogen und geschlossen sein.
- Zum Schutz des gesamten Körpers muss der Schutzanzug in geschlossenem Zustand und zusammen mit anderer geeigneter persönlicher Schutzausrüstung getragen werden (z.B. Handschuhe, Atemschutz, Augenschutzgerät, Überschuhe, Kapuze), deren (Schutz-)Werte mindestens gleich oder höher als die mit diesem Schutzanzug erzielten Werte sein müssen.

- Umweltbedingungen und Arbeitsplatzrisiken müssen in einer arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden.
- Der Schutzanzug ist als Typ 6B vollständig getestet worden.
- Nach dem Kontakt mit flüssigen Chemikalien oder Infektionserregern ist der Schutzanzug unter Vermeidung der Berührung der Außenhülle sorgfältig ausziehen, um eine Kontamination der Haut zu vermeiden.
- Führen Sie vor dem Anlegen des Schutzanzuges eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass er sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Der Schutzanzug darf nicht bei Temperaturen unter -30°C verwendet werden.

REF

PC001

LOT

KS20050606



17.05.2020



17.05.2022



Jiangsu Casdilly Dress co., Ltd., Nr. 111 Hengda Road, Economic and Technical Development Zone, Nanjing, China

EC REP

Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595 AA Den Haag, Netherlands

IMPORTEUR

BARIT Kunstharz-BELAGSTECHNIK GmbH
Eckenerstr. 5, 73730 Esslingen, Deutschland
Gebrauchsanleitung & Konformitätserklärung
unter www.barit.de/Reinraum

Bitte wenden






MEDICAL DISPOSABLE PROTECTIVE SUIT PC001

MEDIZINISCHER EINWEG-SCHUTZANZUG PC001 GEBRAUCHSANLEITUNG (2)

Warn- und Tragehinweise:

- Dieser Schutzanzug sollte nicht gegen andere als die zuvor beschriebenen Risiken eingesetzt werden.
- Eine unsachgemäße Lagerung bzw. Handhabung des Schutzanzuges können dessen Leistung beeinträchtigen.
- Verschmutzung des Schutzanzuges kann zu einem verminderten Schutz führen.
- Verwenden Sie den Schutzanzug nicht, wenn Sie sich in explosionsgefährdeten oder feuergefährdeten/brennenden Umgebungen befinden oder wenn Sie mit explosiven oder brennbaren Substanzen umgehen.
- Dieser Schutzanzug schützt nicht das Gesicht, die Hände und die Füße.
- Schutzausrüstung wirkt auf molekularer Ebene nicht als chemische Barriere.
- Risse dürfen nicht repariert werden; der Schutzanzug ist dann nicht mehr zu verwenden.
- Der Träger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die Kleidung für die jeweilige Substanz geeignet ist.
- In bestimmten Einsatzbereichen kann Abkleben an Arm- und Beinabschlüssen und an der Kapuze erforderlich sein, um die entsprechende Schutzwirkung zu erzielen.
- Zur Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung ist durch den Anwender eine Risikoanalyse durchzuführen.
- Nur der Träger selbst ist verantwortlich für die korrekte Kombination des Ganzkörper-Schutzanzugs mit ergänzenden Ausrüstungen (Handschuhe, Stiefel, Schutzmaske usw.) sowie die eigene Einschätzung der maximalen Tragedauer für eine bestimmte Tätigkeit unter Berücksichtigung der Schutzwirkung, des Tragekomforts sowie der Wärmebelastung.

Größen:

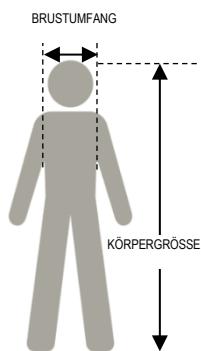

| Größe | A Körpergröße | B Brustumfang |
|-------|------------------|------------------|
| S | 165 | 128 |
| M | 170 | 134 |
| L | 175 | 142 |
| XL | 180 | 150 |
| XXL | 185 | 158 |
| XXXL | 190 | 166 |

Ankleiden und Auskleiden:

Vorbereiten: Unterkleidung und geeignetes Schuhwerk anziehen. Es wird empfohlen, Nitril- oder Latex-Handschuhe unter dem

Anzug zu tragen, um eine Kontamination beim Auskleiden zu vermeiden. Anzug der Körpergröße entsprechend auswählen (siehe Größen-piktogramm im Innenetikett). Anzug auf mögliche Schäden kontrollieren.

Einkleiden: Handschuhe anziehen. Anzug innen im Hüftbereich fassen und wie eine Hose anziehen. Gegen Hinfallen sichern oder zum Anziehen hinsetzen. Hosenbeinabschlüsse kontrollieren und auf Fußgelenkhöhe positionieren, damit der Schuh abgedeckt ist. In die Ärmel schlüpfen. Zum Schutz möglichst einen weiteren Schutzhandschuh überziehen. Übergang zwischen Handschuh und innerem Ärmel möglichst faltenfrei mit Tape abkleben. Haube über den Kopf ziehen. Reißverschluss schließen und durch Abziehen des weißen oder gelben Klebestreifens verkleben. Siehe dazu Schema korrektes An- und Auskleiden.

Auskleiden: Kontamination beachten: Die Außenseite des Anzugs darf nicht ohne Schutzhandschuhe berührt werden. Klebebänder lösen, Haube über den Kopf ziehen, dabei von innen nach außen drehen und nach hinten klappen. Äußere Ärmel über Handschuhe ausziehen und aus Ärmel schlüpfen. Anzug nur von innen anfassen und aus dem Anzug steigen, Handschuhe ausziehen. Schleuse verlassen.

Waschempfehlung:

- Einweg-Schutzanzug, kein Waschen und keine chemische Reinigung vorgesehen, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht trocknen.

Lagerung:

- Lagern Sie den Schutzanzug dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C, nicht unter Sonneneinstrahlung, nur an trockenen und belüfteten Orten und nicht in der Nähe von Chemikalien oder anderen aggressiven Mitteln.

Entsorgung:

- Dieser Schutzanzug muss fachgerecht entsorgt werden, entweder umweltgerecht thermisch oder auf kontrollierten Deponien. Für die Entsorgung kontaminierter Kleidung gelten die jeweiligen nationalen bzw. regionalen Vorschriften.

Verpackung:

- Plastiktüte

Haltbarkeit:

- Der Schutzanzug hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

Weitere Informationen:

- Weitere Informationen wie Prüfzeugnisse und Nachweise finden Sie unter www.barit.de/Reinraum.
- Der Importeur übernimmt keinerlei Verantwortung für den unsachgemäßen Einsatz dieser Schutzanzüge

